

syeltia



BodyGO
Perform Doble

Body Go Perform
V2 Fecha: 08/2025

Índice

MANUAL DE INSTALACIÓN

¡Primero la seguridad!	3-5
Presentación del equipo	6
Advertencias generales	7
Equipo y accesorios	8
Equipo	9
Conexiones y encendido del equipo	10

MANUAL DE USUARIO

Uso indicado	11-13
Advertencias y contraindicaciones	14
Pantallas del equipo	15-17
Limpieza del equipo	18
Especificaciones técnicas	19-21
Glosario	22
Información sobre Sveltia	23

¡PRIMERO LA SEGURIDAD!



Lea atentamente el presente manual antes de realizar alguna operación. Para garantizar la seguridad y la eficacia en la operación del equipo, todo usuario debe leer y comprender en su totalidad este manual antes de realizar el primer uso de Body Go Perform Doble. La ejecución de cualquier procedimiento que difiera de las indicaciones aquí descritas puede ocasionar daños tanto para el paciente como para el operador. Controle las conexiones de los accesorios y la puesta a tierra previo utilización del equipo. Este documento está dirigido a personal médico y operadores capacitados.

El equipo BodyGO Perform Doble debe ser utilizado exclusivamente por personal profesional debidamente capacitado para su manejo. En caso de requerir asistencia o clarificación sobre cualquier sección de este instructivo, por favor, contacte a nuestro soporte técnico a través de: consultas@sveltia.com.



¡PRIMERO LA SEGURIDAD!

Previo al encendido del equipo, se debe verificar cuidadosamente la correcta conexión de todos los accesorios. BodyGo Perform Doble incorpora una conexión a tierra de protección esencial para su operación segura. Cualquier omisión o uso inadecuado de esta conexión podría derivar en daños al equipo, deficiencias en su emisión o riesgos para el usuario, y el fabricante no podrá hacerse responsable de estas eventualidades..

Queda estrictamente prohibido realizar modificaciones en el equipo sin la autorización expresa del fabricante.

Se recomienda mantener una distancia segura entre el equipo en funcionamiento y los dispositivos electrónicos o elementos sensibles a las ondas electromagnéticas (como tarjetas de crédito, teléfonos móviles, etc.), ya que las emisiones del equipo pueden afectar el funcionamiento de dichos dispositivos.



PRIMERO LA SEGURIDAD

Si se advierten roturas, fisuras o cables expuestos tanto en el aplicador como el equipo, el mismo no debe utilizarse. Debe desconectarse de la corriente inmediatamente, ya que existe riesgo de choque eléctrico.

El Body Go Perform Doble, junto con sus aplicadores, utiliza un sistema de refrigeración por aire forzado para mantener su rendimiento óptimo. Es completamente normal que los aplicadores alcancen una temperatura moderada, hasta aproximadamente 42 °C, durante su uso.

Para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y sus aplicadores, es fundamental mantener despejadas todas las rejillas de ventilación. Cualquier obstrucción podría afectar el sistema de refrigeración y el rendimiento del equipo.

Recomendaciones para el Uso de Aplicadores:

Es altamente recomendable que la potencia del aplicador sea ajustada una vez que este se encuentre posicionado correctamente sobre la zona de tratamiento.

Para asegurar la correcta operación y ventilación de los aplicadores, evite cubrirlos con toallas o materiales similares durante su uso.

En tratamientos que involucren un solo aplicador, el aplicador no utilizado debe permanecer en su soporte y no debe activarse su potencia.



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Body Go Perform Doble (en adelante, "el dispositivo") es un equipo de pie diseñado para generar contracciones musculares involuntarias. Su objetivo principal es aumentar, tonificar y fortalecer el tejido muscular.

Para ofrecer un tratamiento más eficiente y optimizar el tiempo de cada sesión, el dispositivo está equipado con dos aplicadores, permitiendo realizar tratamientos de forma simultánea o individual.

El dispositivo crea un campo electromagnético que interactúa con los tejidos del cuerpo, afectando principalmente el tejido muscular y nervioso. Esta interacción provoca la despolarización de las células, generando contracciones musculares, lo que resulta en aumento de la masa muscular y tonificación del tejido muscular.

Configurar los parámetros de la terapia es sencillo e intuitivo gracias a los controles en la pantalla del dispositivo. Se puede iniciar el tratamiento seleccionando uno de los protocolos preestablecidos disponibles, adaptándolos a las necesidades específicas de cada paciente. Durante la sesión, la pantalla muestra la información detallada como el tipo de aplicación, el tiempo restante y los parámetros clave, permitiendo un monitoreo constante y un seguimiento fácil.



ADVERTENCIAS GENERALES



Para operar este equipo de forma segura y efectiva, es indispensable que el personal cuente con la capacitación y calificación adecuadas.

Esto incluye conocer sus principios de operación, método de uso y mantenimiento. Por seguridad, mujeres embarazadas no deben utilizar el dispositivo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso profesional. Le pedimos que evite utilizarlo en exteriores, o en entornos con riesgo de explosión, donde pueda haber ingreso de agua, o en ambientes con exceso de polvo o humedad.

Para un rendimiento óptimo, la temperatura ambiente en el lugar de uso no debe exceder los 25 °C. Es fundamental que la instalación eléctrica del consultorio tenga una conexión a tierra adecuada, siguiendo las normativas eléctricas locales.

Además, siempre verifique que el voltaje y la corriente de la red eléctrica del país, coincidan con los requisitos del dispositivo.

Es fundamental que el paciente no presente ninguna de las condiciones detalladas en la sección. Solo el profesional, a través de un examen o revisando la historia clínica, puede determinar si el paciente es apto para recibir la terapia. Pacientes menores de 13 años no deben ser tratados.



**Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener la toma de aire libre de polvo.
No realizar modificaciones al equipo.**

EQUIPO Y ACCESORIOS



EQUIPO



Banda Elástica



**Aplicador de pulsos
electromagnéticos x2**



Porta aplicador x2




**Cable de alimentación y
documentación correspondiente**



EQUIPO

- A** - Pantalla táctil.
- B** - Porta aplicador.
- C** - Aplicador.

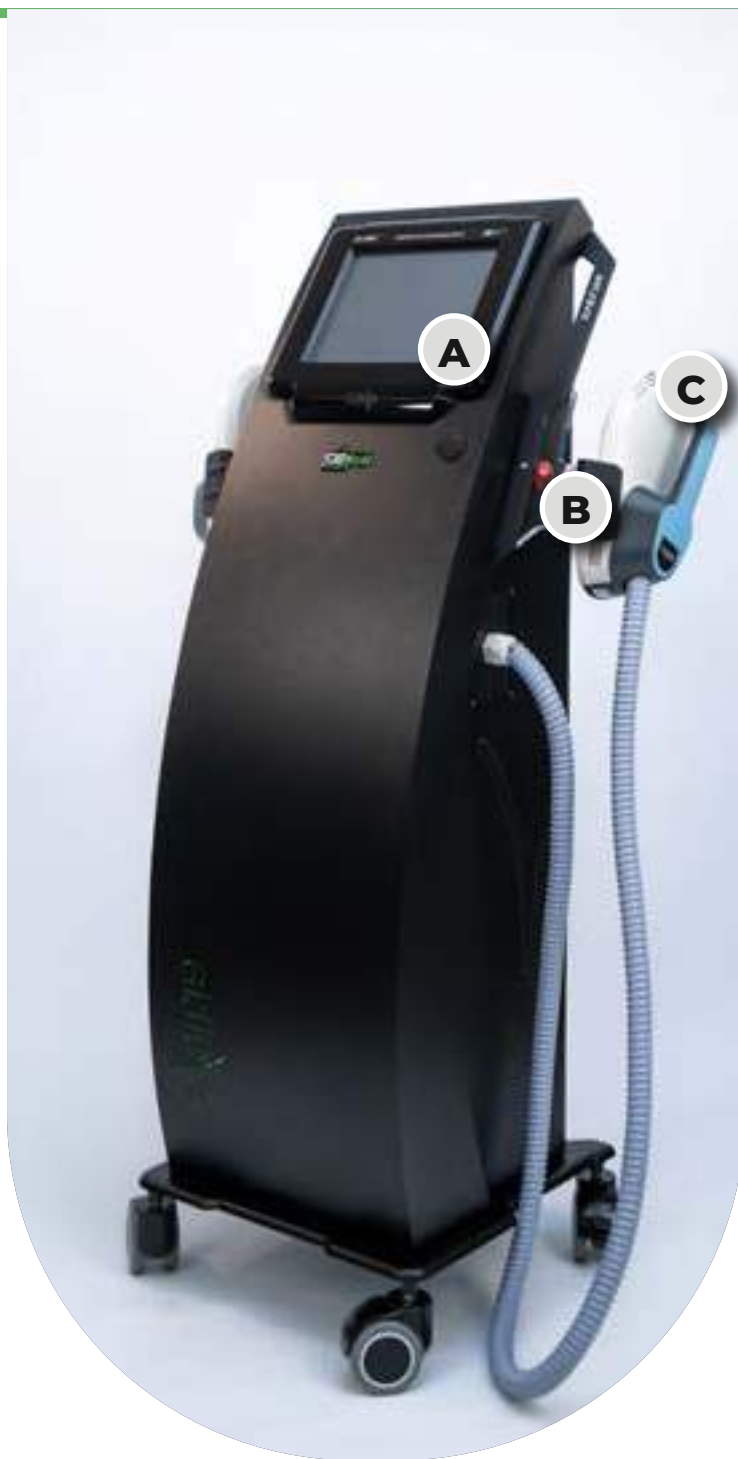

CONEXIONES Y ENCENDIDO DEL EQUIPO



1. Conexión del equipo a la línea

Verifique que la tensión y frecuencia de su unidad corresponden con la del país en que va ser utilizado. Puede chequear esta información en la etiqueta de identificación.

Llave de encendido. **A**

Conexión para el cable de alimentación 220V. **B**



NO CORTE NI PROLONGUE EL CABLE ORIGINAL, NI REEMPLACE LA FICHA.

USO INDICADO

- Fortalecimiento muscular
- Aumento de masa muscular
- Mejora de la irrigación sanguínea
- Tonificación
- Reducción de adiposidad

Principio de funcionamiento :

El aplicador contiene en su interior una bobina de Tesla que genera un campo magnético intenso y pulsante. Este campo estimula músculos y nervios, provocando contracciones musculares y mejorando la circulación. El tratamiento es indoloro y permite activar múltiples músculos sin esfuerzo físico.

CONSIDERACIONES DE USO

- *Los aplicadores deben colocarse sobre el paciente antes de activar el equipo y deben retirarse después de finalizada la aplicación.*
- *No retirar los aplicadores con el equipo activo.*
- *No se debe utilizar ningún medio de acople (ni geles, cremas o similares) entre el aplicador y el paciente. El aplicador se coloca seco directamente sobre el paciente.*



USO INDICADO

Si el tratamiento se realiza con los aplicadores de forma simultánea (por ejemplo, en ambos glúteos), se debe comenzar a aumentar la intensidad hasta lograr una contracción visible y palpable.

Generalmente, el efecto puede ser ligeramente diferente en cada canal para conseguir contracciones similares. Esto se debe a la ubicación del aplicador, las diferencias naturales de los músculos y, especialmente, al objetivo terapéutico del tratamiento.

TEMPERATURA DE LOS APLICADORES

Durante la aplicación, es esperable que los aplicadores eleven su temperatura. Es crucial que la parte en contacto con el paciente no exceda los 42 °C para asegurar una experiencia segura y confortable. Para garantizar esto, el aplicador del dispositivo está equipado con un sistema de refrigeración forzado por aire, que mantiene la temperatura siempre dentro de los valores permitidos para asegurar la seguridad del paciente. Este valor está fijado de acuerdo con las normas internacionales de seguridad, con el fin de garantizar un uso seguro y eficaz del dispositivo.



USO INDICADO

Sí el aplicador no desciende su temperatura, en la pantalla aparecerá un *ícono de alerta*.

Cuando la temperatura descienda y vuelva a los parámetros normales, el ícono desaparecerá, y se podrá reanudar la sesión.

Si notas que la temperatura alcanza el límite rápidamente, te recomendamos considerar lo siguiente:

- **Asegura la ventilación:** es importante verificar que las rejillas de aire del aplicador estén completamente libres. Confirma que ningún objeto, como toallas o sábanas, las esté obstruyendo.
- **Temperatura ambiente óptima:** para un funcionamiento ideal del equipo, la temperatura ambiente debe estar entre 20°C y 22°C. Si supera los 25°C, el rendimiento del dispositivo podría verse afectado.
- **Revisa la configuración:** el uso prolongado del equipo con una potencia de salida alta (más del 70%) o una frecuencia elevada (por encima de 20Hz) puede ser una posible causa.
- **Mantenimiento del aplicador:** es posible que el aplicador requiera mantenimiento, te sugerimos contactar a un Soporte Técnico autorizado.



ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

Para la seguridad del paciente, este equipo no debe ser utilizado en personas que presenten alguna de las siguientes condiciones:



CONTRAINDICACIONES

- Marcapasos o desfibriladores implantados.
- Pacientes epilépticos.
- Implantes electrónicos o metálicos.
- Melanoma.
- Insuficiencia pulmonar.
- Infecciones cutáneas.
- Condiciones de sangrado o estar bajo tratamiento anticoagulante.
- Enfermedad cardíaca o aplicación sobre el corazón.
- Cáncer.
- Fiebre.
- Embarazo.

EFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES

Es común experimentar efectos similares a los de una sesión de ejercicio muscular intensa. Generalmente, estas reacciones son temporales y no suelen requerir la interrupción del tratamiento.

Los efectos que podrían presentarse incluyen:

- Dolor muscular temporal.
- Calambres musculares temporales.
- Dolor temporal en las articulaciones o tendones.



PANTALLAS DEL EQUIPO

ÍCONOS Y SÍMBOLOS DE FUNCIONAMIENTO



Alarma de exceso de temperatura en el aplicador.



Inconveniente en el aplicador. Contactar servicio técnico



Temperatura del aplicador en parámetros normales de funcionamiento.



Funcionamiento del aplicador normal.

ALERTA EN TEXTO

ERROR EN APLICADOR 1

Inconveniente en aplicador. Contactar al servicio técnico

APLICADOR 1 DESCONECTADO

Aplicador 1 se encuentra desconectado

ERROR EN APLICADOR 2

Inconveniente en aplicador. Contactar al servicio técnico

APLICADOR 2 DESCONECTADO

Aplicador 2 se encuentra desconectado

PANTALLA DEL EQUIPO

FUNCIONES



Selección de género.

Ir a pantalla de ajustes.




Ir a pantalla de selección inicio.

Seleccionar la zona.

PANTALLA DEL EQUIPO

FUNCIONES

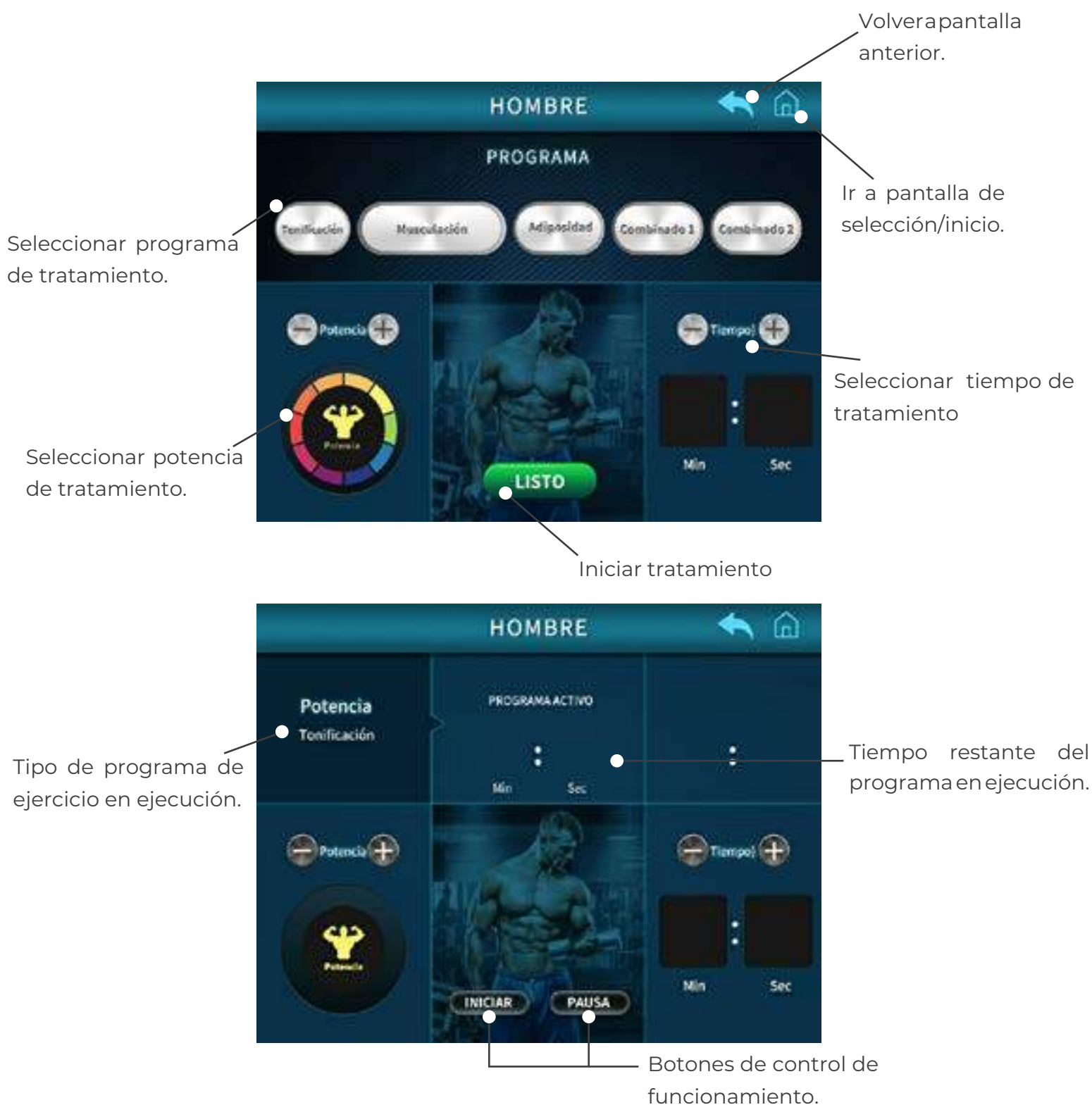

PROGRAMAS

El equipo te permite usar los programas preestablecidos que están guardados en su memoria, simplificando el proceso. No necesitas introducir valores numéricos para ajustar los diferentes parámetros.

Los aplicadores pueden funcionar tanto de manera simultánea como independiente. Si eliges la opción simultánea, ambos aplicadores se inician, pausan y detienen al mismo tiempo, compartiendo también el mismo tiempo de tratamiento.

Simplemente se deben seleccionar en la pantalla: género, zona del cuerpo, programa y tiempo de sesión.

Asimismo, en la pantalla siguiente es posible modificar parámetros como tiempo y potencia según las necesidades del tratamiento.



LIMPIEZA DEL EQUIPO

Antes de cualquier tarea de limpieza, asegúrate de apagar el equipo.

» **Aplicadores y Mangueras:** puedes limpiar y desinfectar los aplicadores y sus mangueras con un paño suave ligeramente humedecido en alcohol al 70%. Una vez finalizada la limpieza, desecha el paño.

» **Cuerpo del equipo:** para limpiar el resto del equipo, usa un método similar, pero ten especial cuidado de no humedecer las áreas donde se encuentran los conectores.

» **Pantalla:** utiliza únicamente un líquido limpia-pantallas comercial para esta zona. Evita cualquier otra sustancia limpiadora que no esté específicamente recomendada en este manual.

INSTALACIÓN

No necesitarás una instalación eléctrica especial, pero es fundamental que el equipo cuente con una conexión a tierra adecuada.

Asegúrate de colocar el equipo dejando un espacio mínimo de 30 cm a su alrededor. Esto es importante para permitir la correcta circulación del aire.

Durante el uso, los aplicadores y sus mangueras no deben tocar ninguna superficie metálica.

DISPOSICIÓN FINAL DEL EQUIPO

Cuando el equipo llega al final de su vida útil, es importante desecharlo de manera adecuada. Esto es clave para cumplir con tres objetivos principales:

1. Retirar equipamiento obsoleto que podría, eventualmente, causar algún daño al paciente.
2. Evitar posibles contaminaciones ambientales.
3. Disminuir la cantidad de desechos no recuperables.

Ten en cuenta que cada región suele tener sus propias regulaciones al respecto, por lo que te recomendamos asesorarte con las Autoridades Sanitarias correspondientes para conocer el procedimiento adecuado en tu localidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO

Display	Táctil a color de 10"
Software	Sveltia
Grado de protección contra líquidos	IPX0
Consumo	1900W
Consumo en StandBy	34VA
Frecuencia	1-30Hz
Alimentación	220V/60Hz
Vida útil	5 años a partir de la fecha de fabricación
Grado de protección eléctrica según IEC 60601	Clase I, Tipo BF

APLICADOR

Cabezal	Bobina electromagnética refrigerada por turbina de alto flujo de aire
---------	---

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Alto (cm)	123
Ancho (cm)	42
Profundidad (cm)	44
Peso (kg)	46,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES AMBIENTALES DE USO

Temperatura	10°C a 40°C
Humedad Relativa	30% a 75%
Presión Atmosférica	700 a 1060 hPa

CONDICIONES AMBIENTALES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura	-40°C a 70 °C
Humedad Relativa	10 a 90 %
Presión Atmosférica	500 a 1060 hPa

GLOSARIO

B

Bobina de Tesla: Componente interno del aplicador que genera el campo electromagnético pulsado.

C

Campo electromagnético: Energía generada por el equipo para inducir contracciones musculares.

D

Despolarización celular: Activación eléctrica de las células musculares y nerviosas, generando contracciones.

F

Frecuencia (Hz): Cantidad de pulsos electromagnéticos emitidos por segundo

P

Potencia (%): Nivel de energía aplicada durante el tratamiento, ajustable en pantalla.

R

Refrigeración por aire forzado: Sistema interno que evita el sobrecalentamiento del equipo y aplicadores.

INFORMACIÓN SOBRE SVELTIA

CorMedic S.A. no se responsabiliza por daños ocasionados a pacientes como consecuencia del incumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Toda la información relacionada con el uso del equipo constituye únicamente sugerencias de uso, quedando su aplicación sujeta al criterio y bajo la exclusiva responsabilidad del profesional tratante.

Por cualquier consulta al área de asistencia técnica o posventa puedes comunicarte al **0800 - 199 - 0045 "opc 3"** o enviando un **WhatsApp al 11-2792-6250**.

Para enviarnos tu consulta técnica sobre tu equipo o solicitar un TURNO ingresa a:
<https://www.sveltia.com/content/6-soporte-tecnico>

En el frente o en la parte posterior del equipo, donde se encuentra el número de serie de la unidad, podrá visualizar algunos de los símbolos detallados en la siguiente tabla. A continuación, se explica el significado de cada uno.

	Puesta a tierra		Radiación no ionizante
	Equipo Clase III		Atención, consulte documentación
	Apilar hasta 3 bultos		Proteger contra la humedad
	Apilar hasta 5 bultos		Equipo Tipo BF
	Frágil		Equipo Tipo B



Sveltia y Sveltia Dermolight Láser son marcas registradas de **CorMedic S.A.**

De Los Calabreses 4204 -
B° Los Boulevares
X5022 Córdoba - Argentina
Tel. +54 351 4751785

D.T.: Ing. Diego Corin
AUTORIZADO POR ANMAT: PM-2089-23

