



RF Vela Korper RF



MUY IMPORTANTE

Este equipo es intrínsecamente seguro para el paciente y operador siempre y cuando se respete la metodología de utilización y se tengan en cuenta las precauciones y advertencias de uso.

Para ello es IMPRESCINDIBLE LA LECTURA Y COMPRESIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.



Para una operación totalmente segura de su unidad VELA KORPER, se recomienda seguir las sencillas normas que a continuación se describen.

Dudas y Preguntas

Nuestro Departamento de Academia está disponible para responder preguntas, aclarar detalles de funcionamiento y cualquier otro tema.

Por favor siéntase libre de enviar un correo o llamar

academia@sveltia.com Tel. +54-351-4751785 / Wsp +54-9351-2010028

TABLA DE CONTENIDO

Pág 4- Descripción del VELA KORPER RF

Pág 5- Primero la seguridad

Pág 6- Contenidos y accesorios

Pág 7- Uso indicado

Pág 8- Precauciones y advertencias

Pág 9- Preguntas frecuentes

Pág 10- Descripción del equipo

Pág 11- Conexiones

Pág 12- Mantenimiento y limpieza del filtro

Pág 13,14- Funcionamiento

Pág 15- Advertencias generales

Pág 16- Especificaciones técnicas

Pág 17- Información Sveltia



RF Vela Korper RF



Vela Korper combina radiofrecuencia bipolar a través de un aplicador con rodillos motorizados, combinación de energía lumínica visible e infrarroja, masaje y succión controlada.

Diseñado para tratamientos de Celulitis y modelación corporal no invasiva. Máxima seguridad en tratamientos recomendados con las precauciones habituales de todas las tecnologías. Esta combinación genera un efecto superficial en los tejidos que colaboran en potenciar la acción de la radiofrecuencia.

La combinación de agentes físicos actuando simultáneamente produce una sinergia que incrementa la eficacia terapéutica y disminuye los tiempos de respuesta permitiendo aportes de energía mayores que los sistemas convencionales, logrando más profundidad y acción pareja e intensa.

- Rápida visualización de los resultados.
- Máximo confort en el paciente, ya que la acción del calor combinado con succión y masaje generado por la acción de los rodillos, produce un agradable efecto.
- Máxima seguridad: Es posible efectuar todos los tratamientos recomendados solo con las precauciones habituales.



¡PRIMERO LA SEGURIDAD!

- VELA KORPER debe ser utilizado exclusivamente por personal profesional calificado.
- La pieza de mano o cabezal debe ser aplicado directamente sobre la piel, utilizando un medio de acoplamiento adecuado. No colocar paños, telas o similares dado que estos pueden producir daños sí se enganchan con los rodillos.
- Cuando se utiliza radiofrecuencia se debe tener especial precaución de no sobrepasar la temperatura en la piel de unos 40 / 42 grados centígrados.
- La aplicación de succión puede producir efectos secundarios no deseados sino se siguen los protocolos de uso..
- Siempre es importante seguir las sugerencias de uso proporcionadas por el equipo de profesionales idóneos a cargo. Ellos son quienes a través de la validación del producto han realizado las pruebas de uso suficientes para lograr seguridad clínica y eficacia terapéutica.



Botón de STOP - Emergencia
Oprimir para desconexión
inmediata del equipo.
Para Desbloquear, gire hacia
la derecha.

Dudas y Preguntas

Nuestra Área de Academia está disponible para responder preguntas, aclarar detalles de funcionamiento y cualquier otra inquietud.

sveltia@sveltia.com
academia@sveltia.com

CONTENIDO Y ACCESORIOS



EQUIPO



APLICADOR CON RODILLOS MOTORIZADOS,
RADIOFRECUENCIA, LED DE ALTA POTENCIA Y
SUCCIÓN CONTROLADA.



PORTACABEZAL CON 2 TORNILLOS Y LLAVES
DE FIJACIÓN



CABLE DE ALIMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE



INDICACIONES

La indicación principal es para el Tratamiento de la Celulitis y la remodelación corporal no invasiva

- Flacidez cutánea
- Tratamiento de Adiposidad localizada
- Activación de la circulación sanguínea
- Favorecimiento del drenaje linfático



CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Generales

- Embarazo y lactancia.
- Portadores de prótesis metálicas, marcapasos.
- Cardiopatías graves.
- Alteraciones de la coagulación.
- Tumores e infecciones.
- Implantes de colágeno recientes.

Un enrojecimiento de la piel y un pequeño edema son los signos clínicos visibles normales, pero no deben observarse otras anomalías como micro ampollas, reacciones alérgicas, prurito excesivo, etc.

PRECAUCIONES

- Instale y opere el equipo de acuerdo los requisitos indicados en este manual, el cual debe ser leído detenidamente antes de utilizar la unidad.
- El cabezal se debe aplicar directamente sobre la piel, utilizando un medio de acoplamiento recomendado, por ejemplo, glicerina líquida.
- No intercalar paños, apósitos o gasas que podrían dificultar el giro de los rodillos.
- No deje el equipo al alcance de los niños.
- Nunca abandone el cabezal mientras el equipo está emitiendo RF
- **No utilizar geles acuosos como medio de acoplamiento**

ADVERTENCIAS

TEMPORALMENTE PUEDEN APARECER:

- Enrojecimiento de la piel en la zona tratada después de la sesión que suele durar desde unos minutos a horas (eritema).
- Molestia en la zona en la que se lleva a cabo la sesión y que suele durar, al igual que el enrojecimiento, un corto período de tiempo.



Cualquier uso distinto al definido por el fabricante se considera inadecuado o indebido, por lo cual Cormedic S.A no se hará responsable de las consecuencias ocurridas por dichos hechos.

“No se permite modificar el equipo”

PREGUNTAS FRECUENTES

? 1 ¿Cuánto tiempo pasa hasta notar resultados?

De manera inmediata se siente calor intenso y mejora de la textura de la piel, sin embargo los resultados comienzan a visualizarse a partir de los 7 días con un pico a los 30 días coincidente con la neocolagenogénesis.

? 2 ¿Cuántas sesiones son necesarias?

La cantidad de sesiones mínimas es de 8 (ocho). 2 sesiones por semana, cada 48-72 hs una de la otra.

? 3 ¿Cuánto duran las sesiones y cada cuánto tiempo se deben realizar?

Se trabajan según la zona entre 15 a 25 minutos.

? 4 ¿Cuánto tiempo duran los resultados?

Depende de la combinación que realizamos y el plan de tratamiento que debe ser personalizado de acuerdo a cada paciente.

? 5 ¿Por qué se combinan terapias de vacío, radiofrecuencia, energía infraroja y rodillos tensores?

Esta combinación mejora notablemente los resultados permitiendo trabajar a mayor profundidad lo dando mejores efectos en todos los tejidos comprometidos, mejorando así casos de celulitis, adiposidad localizada y flacidez.

? 6 ¿Qué personas son las adecuadas para recibir este tratamiento?

Ideal en casos de celulitis, flacidez y adiposidad localizada.

? 7 ¿Es invasivo aunque sea parcial o mínimamente?

Es un método no invasivo, cómodo, de alta aceptación por los pacientes que pueden notar desde las primeras sesiones mejoras en el moldeado corporal.

? 8 ¿Qué post tratamiento es necesario?

En el post tratamiento se recomienda cuidados habituales que realice el paciente, pudiendo potenciar con actividad física y otros tratamientos de apoyo tanto en consultorio como domiciliarios de rutina.

? 9 ¿El tratamiento puede dejar marcas temporales o indelebles?


No deja ningún tipo de marcas

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

FRENTE DEL EQUIPO



- A. Aplicador
- B. Porta Cabezal
- C. Pantalla táctil
- D. Conector de Cable de alimentación
- E. Salida de aplicador
- F. Botón de stop para emergencia
- G. Conector de cabezal
- H. Filtro / Trampa de impurezas
- I. Llave encendido de línea
- J. Cooler para ventilación. (No obstruir)
- K. Identificación de la unidad

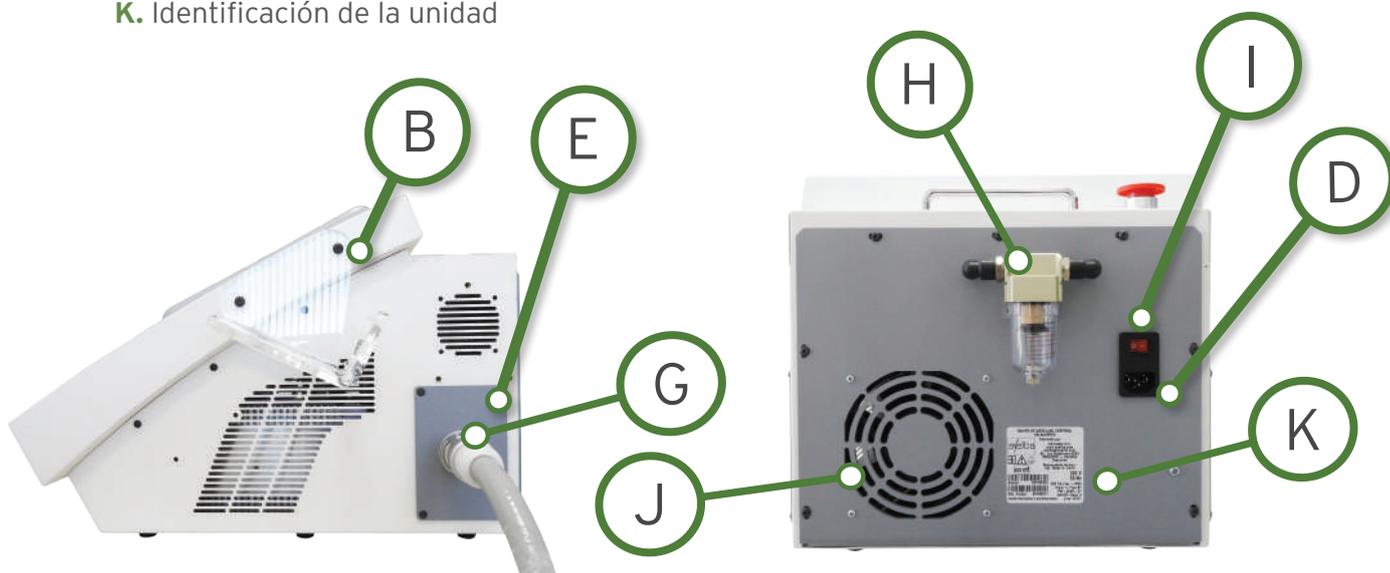

LATERAL DEL EQUIPO

DORSO DEL EQUIPO

CONEXIÓN DEL CABEZAL



PRECAUCIÓN:
Inserte la ficha respetando la posición de la muesca. Luego ajuste el anillo de seguridad. No fuerce ni utilice herramientas.



PRECAUCIÓN:
No conecte ni desconecte el cabezal con el equipo encendido.

CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA RED



Verifique que la tensión y frecuencia de su equipo corresponden con la del país en que va a ser utilizado. En la etiqueta de la parte posterior puede chequear esta información.



Verifique que la ficha de conexión a la línea corresponda con la del país en el que va a utilizarse el equipo. No corte el cable ni reemplace la ficha original.



El encendido se realiza mediante la llave ubicada en la parte posterior de la unidad. La pantalla demora unos instantes en iluminarse mientras se inicia el sistema operativo del equipo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL FILTRO TRAMPA



Se recomienda realizar una revisión visual periódica del estado del depósito de filtro de cada cabezal para evitar acumulación de lodos.

PROCEDIMIENTO

1- Revisar visualmente el estado del filtro trampa correspondiente a cada cabezal y determinar si hay restos de medio de acoplamiento (ej. glicerina) contenido en la trampa de agua del filtro.

2- En la imagen 2 se puede observar como se presenta un filtro trampa con restos de medio de acoplamiento, la misma es succionada por el cabezal y corresponde al medio de acoplamiento utilizado en los tratamientos. Puede ser mas claro o mas oscuro dependiendo de si carga impurezas o no.


3- Para limpiar el depósito del filtro trampa es necesario desenroscar en sentido anti-horario (como muestra la imagen 3) y retirarlo para poder desechar su contenido, lavarlo, enjuagarlo con agua y secarlo. Una vez limpio es necesario colocarlo nuevamente en su sitio posicionándolo y enroscándolo en sentido horario.



1



2

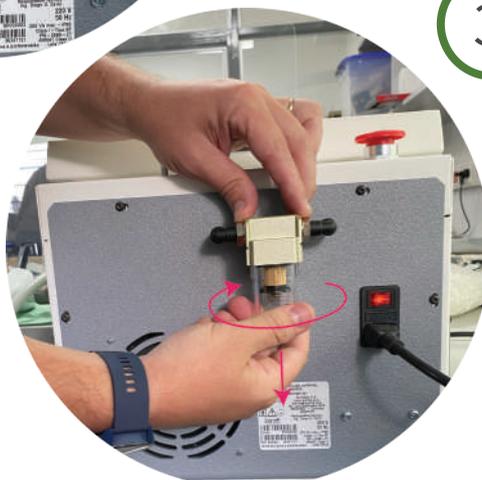

3

IMPORTANTE


Al enroscar el filtro trampa verifique que el anillo de goma se encuentra bien posicionado. De lo contrario no se producirá el vacío adecuado.

PANTALLA INICIAL

1) Selección de tratamiento MODELACIÓN CORPORAL



PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

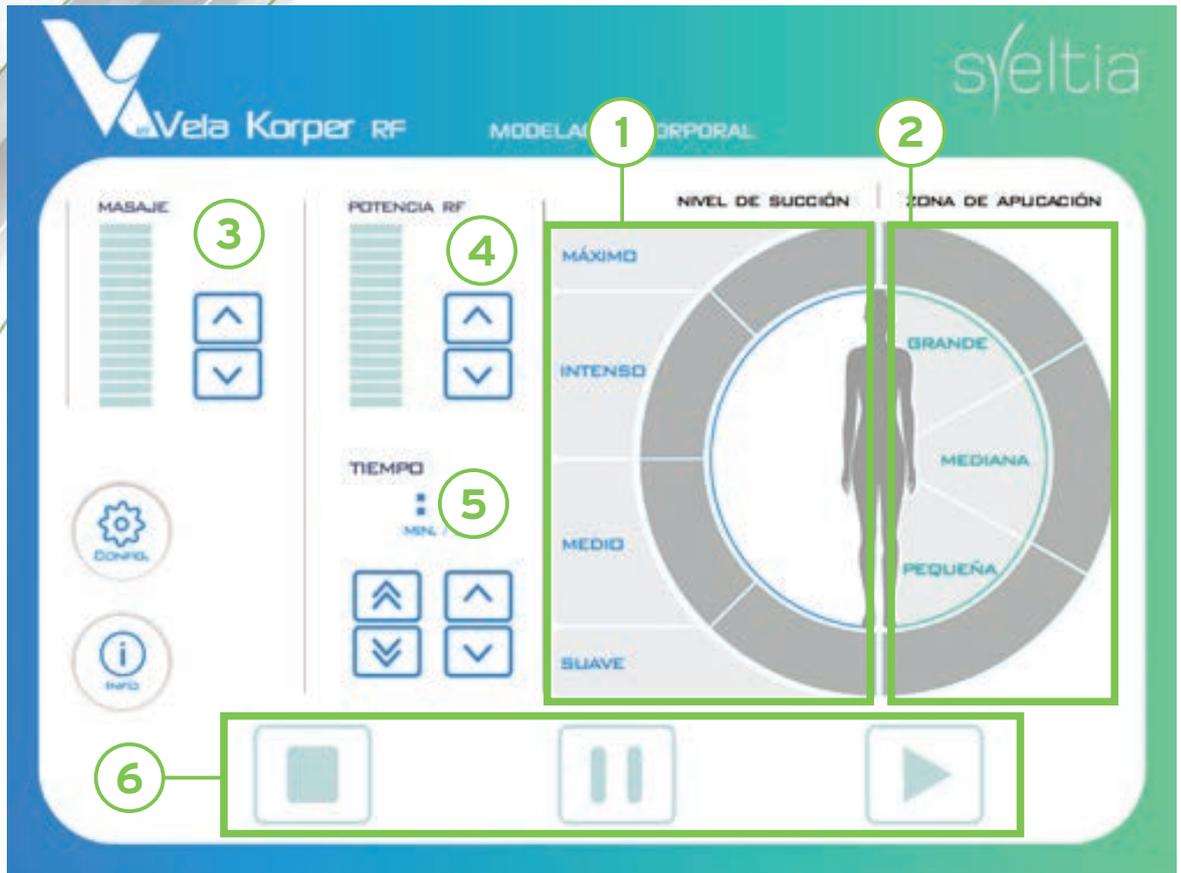

1-Nivel de Succión: Regula la potencia de succión de la bomba de vacío.

2-Zona de Aplicación: Control del tiempo de succión y liberación de la bomba de vacío durante todo el tratamiento.

Zona Grande: 14 segundos de vacío (Succión) / 2 segundos sin vacío (Liberación).

Zona Mediana: 10 segundos de vacío (Succión) / 2 segundos sin vacío (Liberación).

Zona Pequeña: 6 segundos de vacío (Succión) / 2 segundos sin vacío (Liberación).

3-Masaje [0 a 100%]: Controla la velocidad de giro de los rodillos.

Masaje al 0%: Giro de los rodillos desactivado.

Masaje al 100%: Máxima velocidad de giro de los rodillos.

4-Potencia RF [0 a 100%]: Controla la cantidad de emisión de radiofrecuencia aplicada (Los rodillos son los electrodos de RF).

Zona Grande: 14 segundos de vacío (Succión) / 2 segundos sin vacío (Liberación).

Zona Mediana: 10 segundos de vacío (Succión) / 2 segundos sin vacío (Liberación).

Zona Pequeña: 6 segundos de vacío (Succión) / 2 segundos sin vacío (Liberación).

5-Tiempo (1 al 60): Duración del tratamiento.

6-Controles de Uso:

PLAY: Activa el sistema de modelación corporal.

PAUSA: Desactiva el sistema manteniendo los valores actuales del tratamiento.

STOP: Desactiva el sistema reseteando los valores del tratamiento a sus valores por defecto.

IMPORTANTE

El tiempo de pausa de 2 segundos sin succión se utiliza para efectuar el movimiento del cabezal.

ADVERTENCIAS GENERALES



- **Vela Korper** no debe ser utilizado simultáneamente con otros equipos que produzcan radiaciones electromagnéticas o de otro tipo que puedan interferir con el correcto funcionamiento de la unidad.

- NO es adecuado para trabajo en atmósferas con presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.

- Este equipo no posee partes que puedan ser reparados por el usuario, por lo tanto se recomienda no abrir la unidad ni los cabezales.

En caso de necesidad de reparación o ajuste, éste debe ser realizado en fábrica o en servicios técnicos autorizados por **Cormedic S.A.**

- Controle frecuentemente si el cabezal de tratamiento se encuentra en buenas condiciones. El mismo no debe poseer grietas o fisuras y los cables y conectores deben encontrarse en buen estado.

Comuníquese con fábrica o servicios técnicos autorizados ante estas situaciones.



PROHIBIDO

Utilice el equipo en ambiente interno en 10-40°C (riesgo de daño o fuego posible si no se sigue esta instrucción).



PRECAUCIÓN

No utilice el equipo en ambiente de alta humedad (riesgo de fuego o descarga eléctrica).



PROHIBIDO

Mantenga el equipo alejado de niños.



PRECAUCIÓN

Mantenga el equipo en posición horizontal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO RADIOFRECUENCIA

Modelo: **Vela Korper RF**
Fabricante: **Cormedic S.A.**
Marca: **Sveltia**

Parámetros de tratamiento

Potencia máxima: RF 120W (sobre 200 ohms de carga)

Frecuencia de trabajo RF: 5 MHz

Modo de funcionamiento en Succión: Suave, Medio, Intenso y Máximo. Min. 8 cmHg y Máx. 45 cmHg

Niveles de Masajes: Por regulación de velocidad de rodillos

Parámetros eléctricos y protecciones:

Línea de alimentación: 220V 50/60Hz

Consumo de energía máximo: 360 W

Protección eléctrica (según norma IEC60601): Clase I tipo BF

Protección contra la penetración de líquidos: IPX0

Software: Velakorper Sveltia

Pantalla: Display LCD Touchscreen 10"

Medidas y Peso:

Medidas: 330 x 470 x 380 mm (alto x largo x ancho, sin portacabezal)

Peso: 5.5 kg

Condiciones ambientales de uso:

Temperatura: 10 a 40 °C

Humedad relativa: 20 a 80% (sin condensación)

Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa

Condiciones ambientales de transporte y almacenamiento:

Temperatura: -40 a 70 °C

Humedad relativa: 10 a 90 %

Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa



Sveltia y **Vela Korper** son marcas registradas de **CorMedic S.A.**

Bv. Los Calabreses 4204
Los Bulevares - Córdoba - Argentina
Tel. +54-351-4751785

sveltia@sveltia.com
www.sveltia.com

D.T.: Ing. Diego Corin



Creemos que la información contenida en este manual será corregida en el momento de impresión, no obstante, **CorMedic S.A.** tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades existentes.

CorMedic S.A. declina toda responsabilidad por eventuales daños producidos a pacientes, atribuibles a:

- No respetar las normas de seguridad.
- Falta de idoneidad o capacitación del personal.
- Utilización del equipo en condiciones inadecuadas.

En el frente de su equipo o en la parte posterior del mismo donde se encuentra el número de serie de la unidad, Ud. hallará algunos de los símbolos de la tabla siguiente. En dicha tabla se detalla el significado de los mencionados símbolos.

	Puesta a tierra		Radiación no ionizante
	Equipo Clase II		Atención, consulte documentación
	Apilar hasta 3 bultos		Proteger contra la humedad
	Apilar hasta 5 bultos		Equipo Tipo BF
	Frágil		Equipo Tipo B

Vela Korper RF



sveltia®

sveltia@sveltia.com
www.sveltia.com